

# RepliCase™ Hip

Cement Spacer Mold



THA再置換時の  
セメントスペーサーを簡単に。

●THAタイプのスペーサーモールド  
脱臼の予防に貢献します。

●3サイズに対応  
小柄な日本人への適用に配慮した  
ラインナップです。

●医療用シリコン製  
オートクレーブ滅菌により、繰り返しの  
使用が可能です。




簡単な手技で3サイズに対応。  
再使用可能なスぺーサーモールドです。

## Surgical Procedures

### 1 モールドサイズを選択


測定された白蓋のサイズ(mm)	50, 52	54	56以上
推奨サイズ	S	M	L

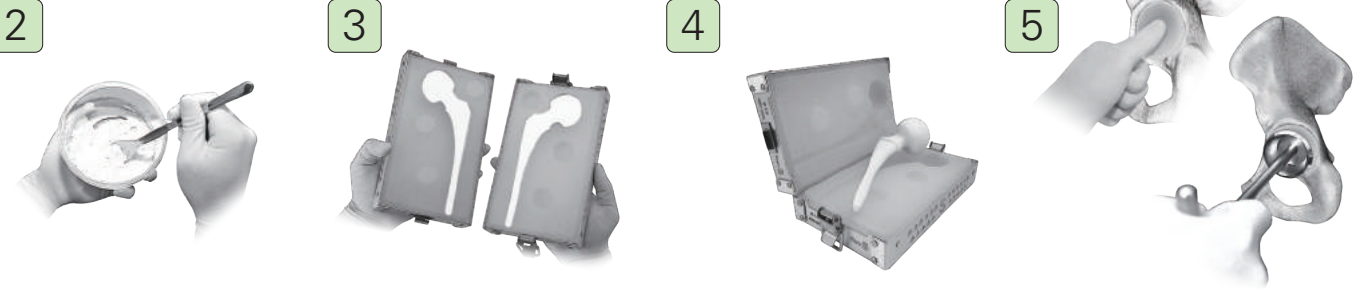

- 注 意: ●骨セメントおよび抗生物質は製品に含まれていません。  
●寛骨臼サイズが50mm径未満の場合、寛骨臼スぺーサーカップは必ずしも必要ありません。ヘッドの直径に合わせて、適切なサイズをお選びください。  
●大腿骨スぺーサーの作製には、少なくとも2パックの骨セメントが必要です。スぺーサーカップの骨セメント量は、白蓋サイズおよび骨欠損程度によって異なります。

## Specification

サイズ	S	M	L
カップ径(mm)	46	49	52
ヘッド径(mm)	42	45	48
オフセット(mm)	36	39	43
頸体角(°)	130	130	130
ステム長(mm)	145	145	145
遠位径(mm)	9	10	11

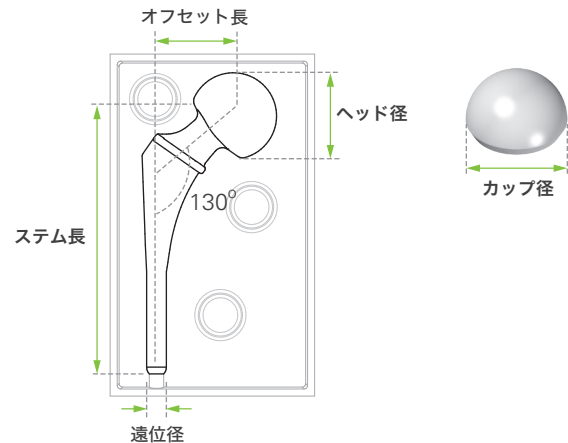

## Order Information

### RepliCase™ Hip Cement Spacer Mold



カタログ番号	サイズ	ヘッド径
9909-5009	S	42 mm
9909-5010	M	45 mm
9909-5011	L	48 mm



カタログ番号	品名
9909-8110	RepliCaseセメントモールドケース

カタログ番号	品名
9909-1101	アセタブラーカップ モルダールハンドル
9909-5046	アセタブラーカップ モルダール: 46 mm
9909-5049	アセタブラーカップ モルダール: 49 mm
9909-5052	アセタブラーカップ モルダール: 52 mm

一般的名称: 関節手術用器械 販売名: RepliCase ヒップ 医療機器届出番号: 14B1X1001610001



製造販売元  
ユナイテッド・オーソペディック・ジャパン株式会社  
〒220-0004 横浜市西区北幸2-9-40 銀洋ビル5階  
TEL 045-620-0741 FAX 045-620-0742  
UOJロジスティクスセンター  0120-16-0805  
UOJロジスティクスセンター FAXナンバー 045-620-3416

販売店