




UNITED  
ORTHOPEDIC®

# リユース可能な手術器械 分解／洗浄マニュアル 「Hip用」

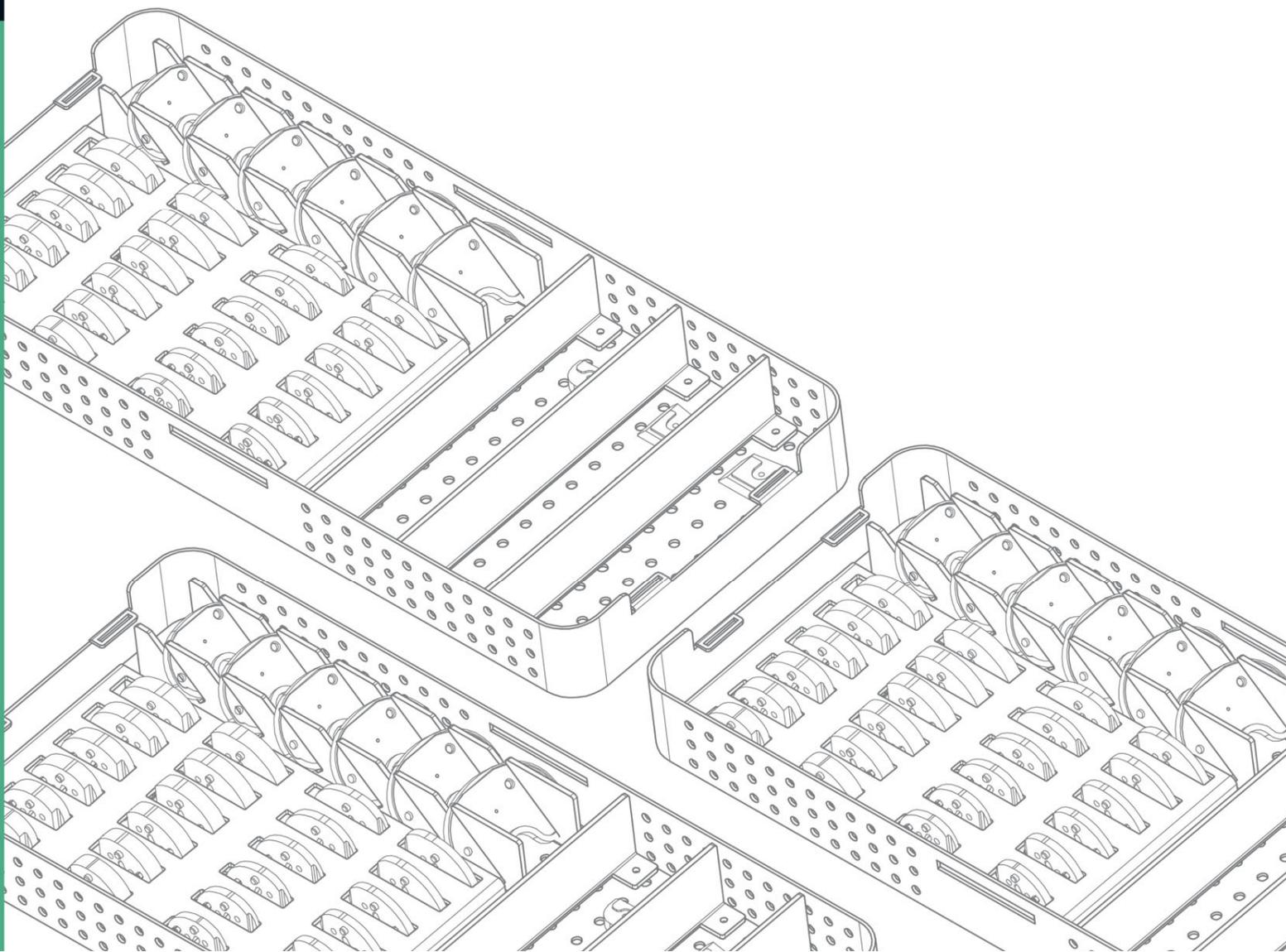

# Content

医療施設洗浄 - 図記号 .....	1
オフセット カップインパター .....	1
EX. 9206-1105 .....	1
ストレート カップリーマーハンドル.....	2
EX. 9203-1201-RA .....	2
オフセット カップリーマーハンドル.....	3
EX. 9206-1102-RA .....	3

# 医療施設洗浄 – 図記号





図記号	説明	規格/参照番号
	<b>方向</b> 動きや力の方向(押す, 引く, 曲げる)を示します。	ISO 14617-2 / 241
	<b>回転方向</b> 対象または対象を介して機器を時計回りに回転させることができることを示します。	ISO 7000 / IEC 60417 / 0004
	<b>二方向への回転</b> 対象または対象を介して機器を時計回りと反時計回りに回転させることができることを示します。	ISO 7000 / IEC 60417 / 0005
	<b>注意</b> 取扱いについて注意事項があることを示します。	ISO 15223-1 / 5.4.4 EN 980 / 5.11
	<b>水道水による洗い流し</b> 蛇口や接続部の開栓等、給水を開始することを示しています。	ISO 7000 / IEC 60417 / 5574
	<b>スプレー</b> 液体を噴射することを示しています。	ISO 7000 / IEC 60417 / 0073
	<b>回転ブラシ</b> 回転ブラシを使用することを示しています。	ISO 7000 / IEC 60417 / 0307
	<b>成功</b> 肯定応答する操作部であることを識別します。 肯定応答または成功の状態の表示に用います。	ISO 7000 / IEC 60417 / 6334A
	<b>失敗</b> 否定応答または失敗の状態の表示に用います。	ISO 7000 / IEC 60417 / 6335B

 より詳細な洗浄手順については「リユーズブル手術器械使用後の処理手順」を参照してください。

# オフセット カップインパクト

EX. 9206-1105

## 分解／組立方法

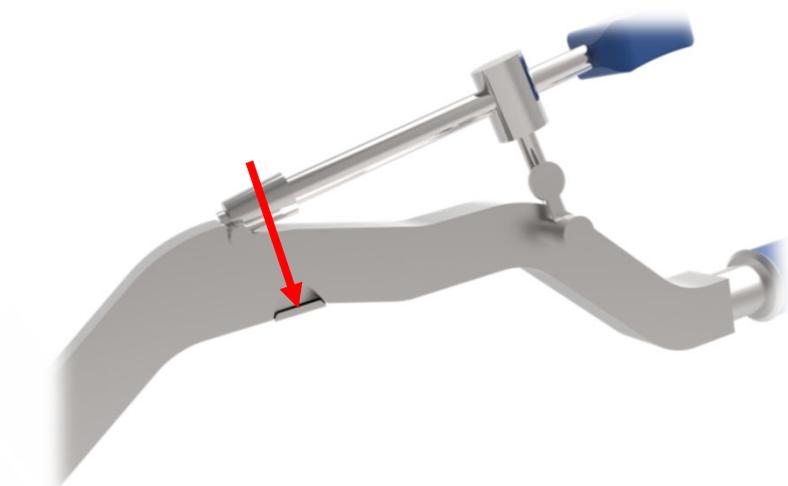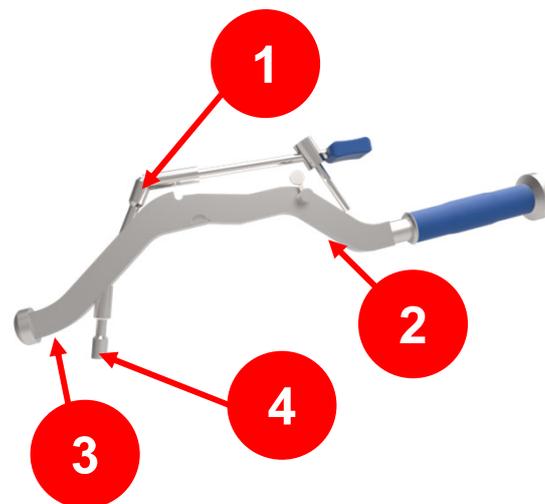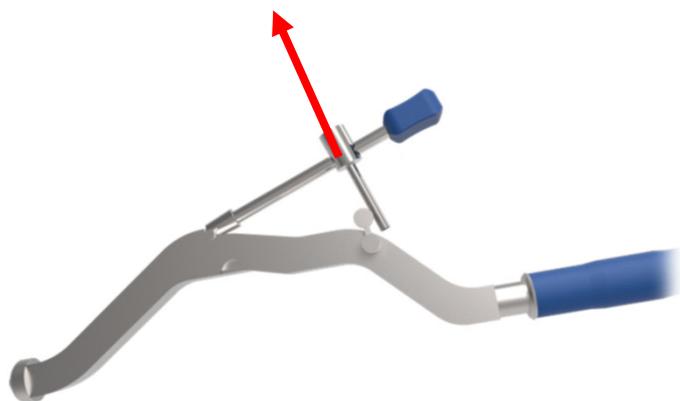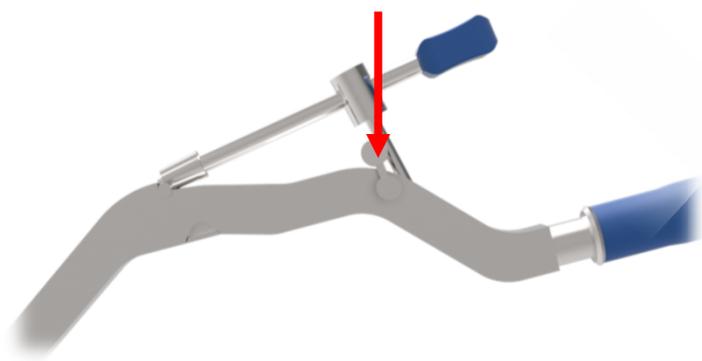


## 洗浄





# ストレート カップリーマーハンドル

EX. 9203-1201-RA

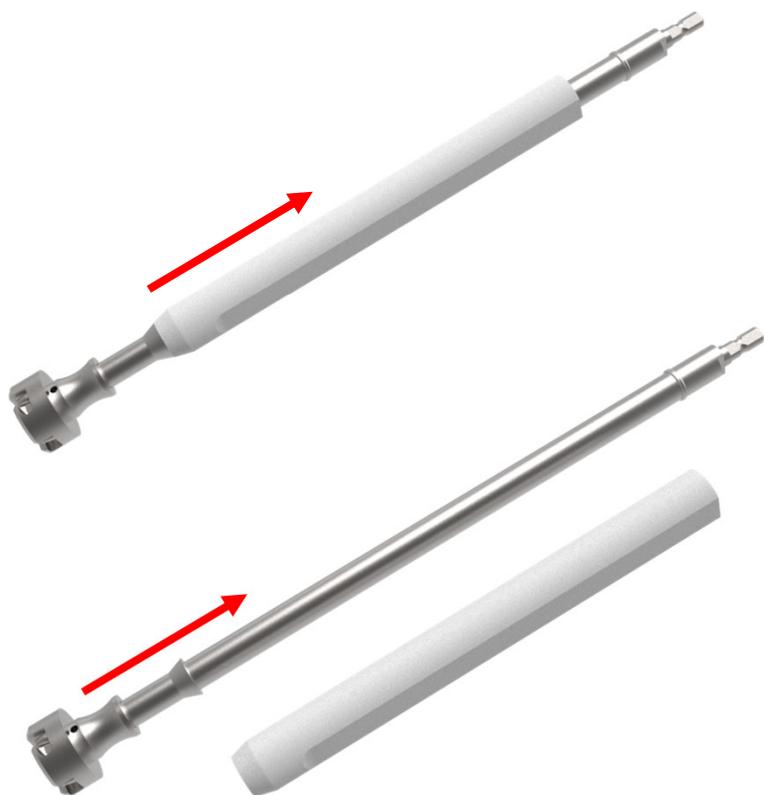

洗浄

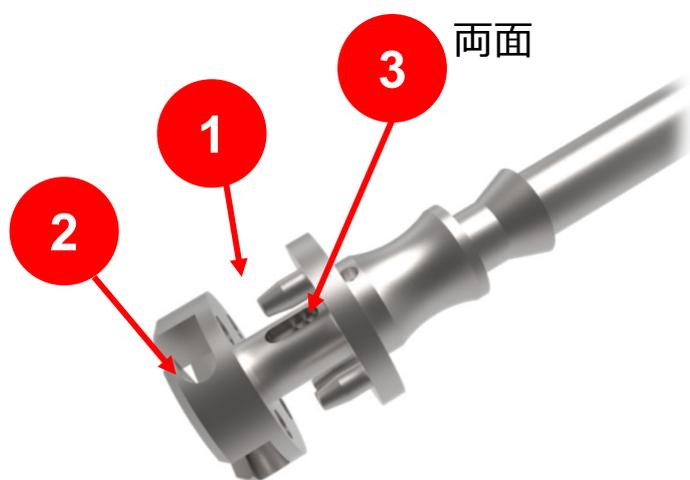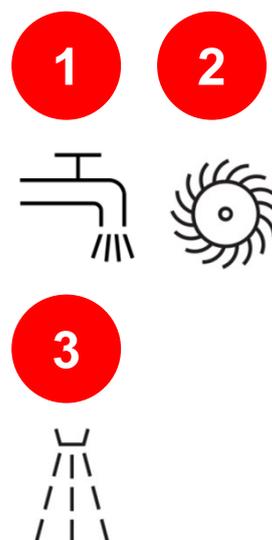


# オフセット カップリーマーハンドル


EX. 9206-1102-RB

## 分解方法

Step 1

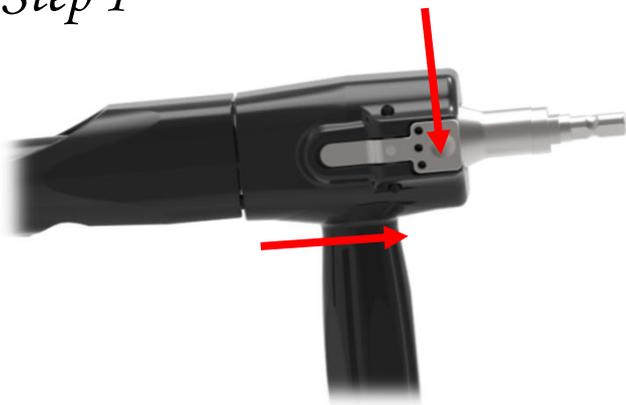


Step 2

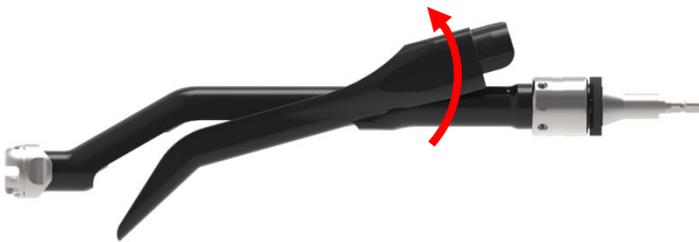

Step 4



Step 3

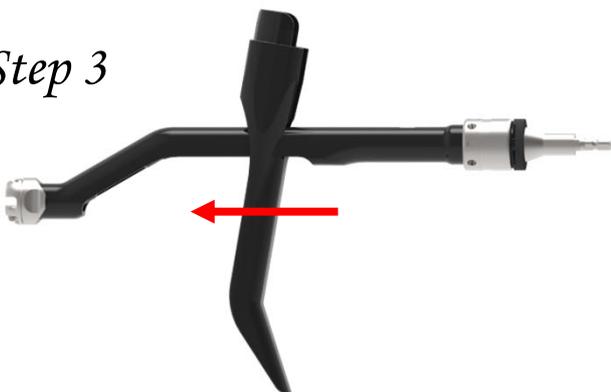



Step 5




Step 6




Step 8

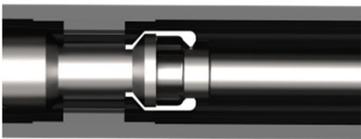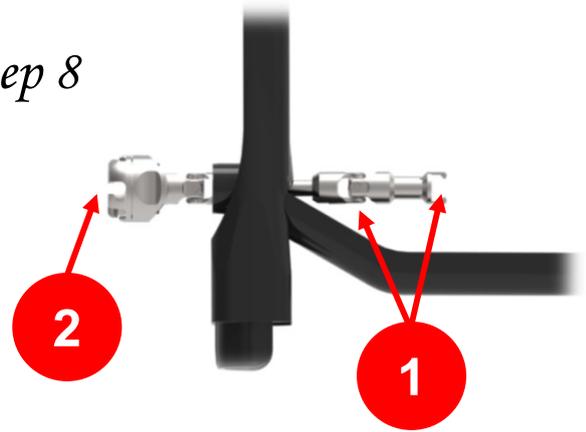


Step 9

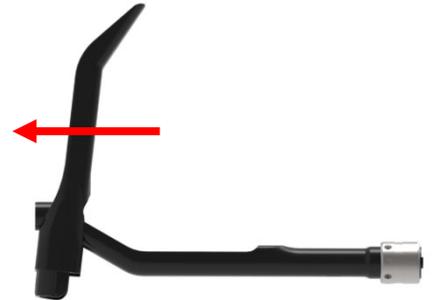

Step 7

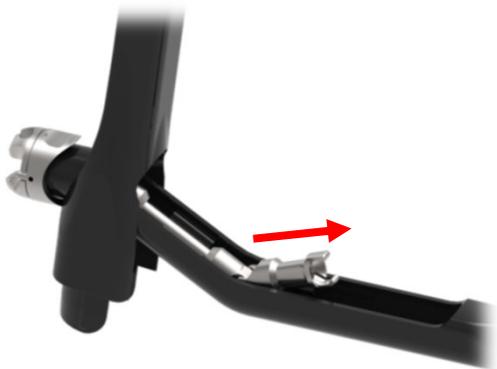


洗浄

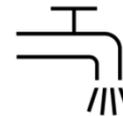


分解した状態で滅菌してください。

# 組立方法


Step 1

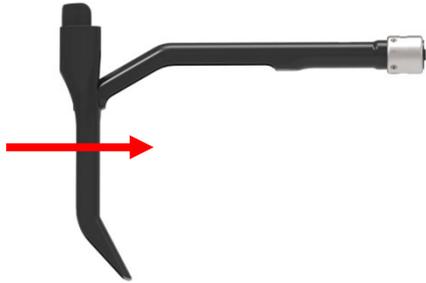

Step 2

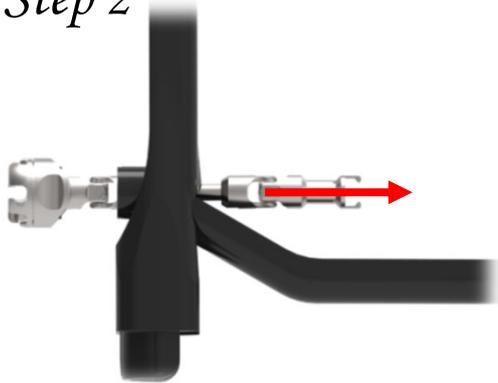


Step 3

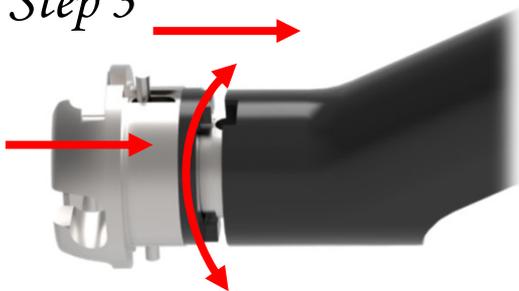


Step 4








Step 5

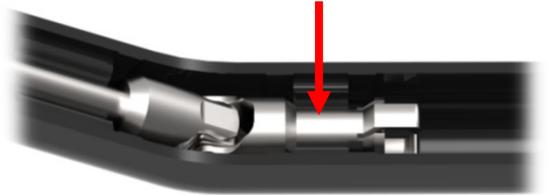

Step 6

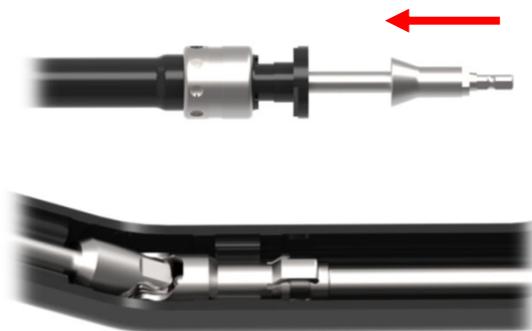

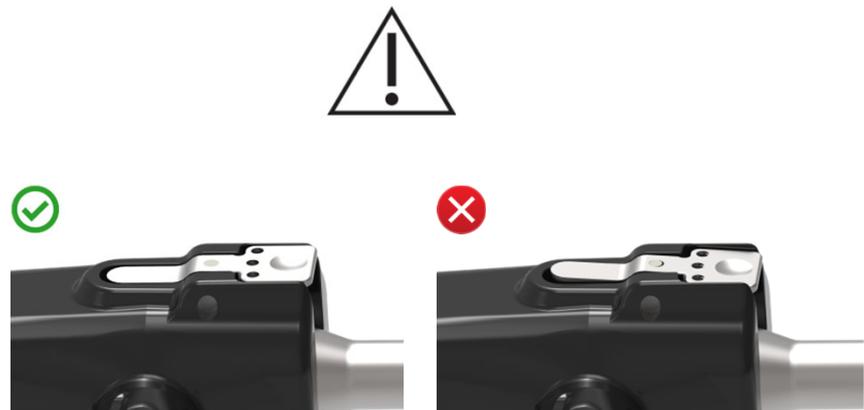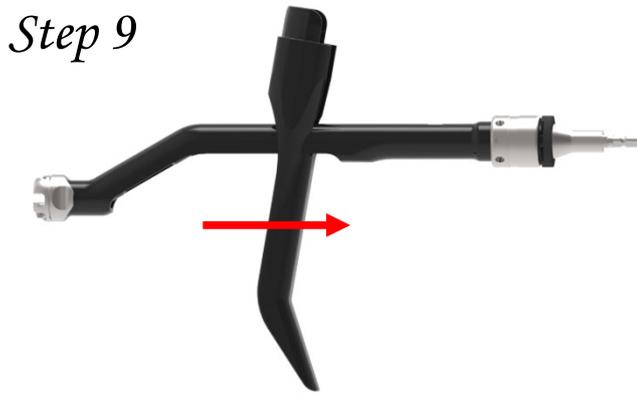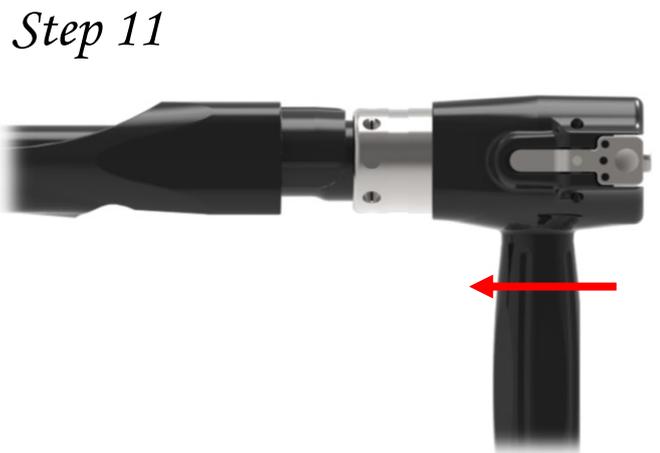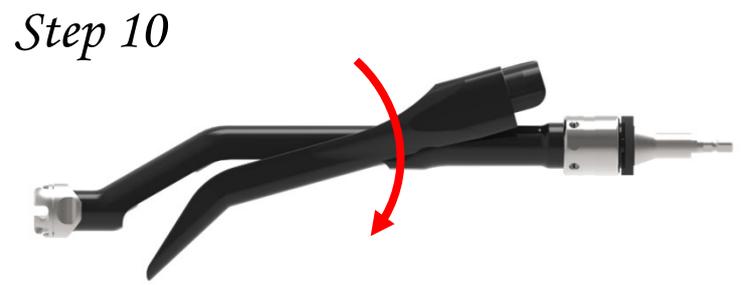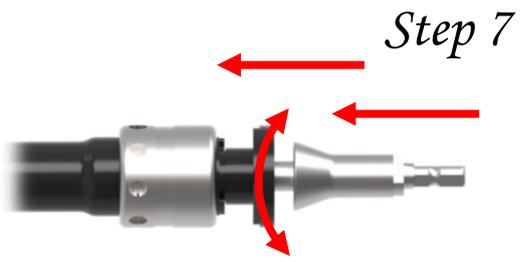

Please note that this Surgical Technique Guide has been authored in the English language. Any translations into other languages have not been reviewed or approved by United Orthopedic Corporation and their accuracy cannot be confirmed. Any translated guide should be reviewed carefully prior to use and questions regarding a Surgical Technique Guide should be directed to United Orthopedic Corporation at [unitedorthopedic.com/contact](https://www.unitedorthopedic.com/contact)

The CE mark is valid only if it is also printed on the product label.

